

ACCURO

Plataforma de telecomunicaciones y seguridad para hospitales y residencias 100% IP



Manual maletín demo ACCURO

El maletín DKA-231 es una maqueta portátil del sistema de paciente enfermera ACCURO. Contiene los elementos típicos que podemos encontrar en una habitación de hospital o residencia y visualizar su funcionamiento:

- Central de habitación CHC-231.
- Base de pared con botones de llamada y conector de pera LLC-903.
- Pera de llamada y control de luces LLC-711.
- Tirador de baño LLC-921.
- Lector de tarjetas para presencia y control de accesos RFI-722.
- Señalizador SEN-724.


Además, incluye su propia red WIFI, que permite recibir llamadas en teléfonos SIP y acceder a ACCUROViewer y ACCUROManager.

A continuación, se describe cómo encender el sistema, acceder a ACCUROViewer y ACCUROManager y configurar un smartphone para recibir las llamadas.

1. Encendido del maletín

Enchufar el maletín.

Esperar hasta que el CHC-231 muestre el siguiente texto (puede llegar a tardar 1 minuto):

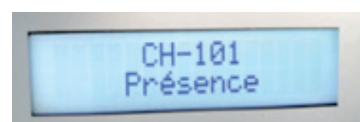

2. Acceso a ACCUROViewer

Acceder a la wifi del maletín: ACCURO_WIFI

Leer el siguiente QR: <http://172.23.201.1/ALCADViewer>



3. Acceso a ACCUROManager

Acceder a la wifi del maletín: ACCURO_WIFI

Leer el siguiente QR: <http://172.23.201.1/ALCADManager>
User: admin
Password: alcad



4. Configurar el smartphone

Para poder recibir llamadas y hablar con la habitación se requiere instalar un smartphone. ALCAD recomienda GS wave.

Descargar APP softphone.

Entrar en APP.

Ir a: Ajustes -> Opciones de cuenta-> Pinchar en el símbolo de "+".

Configurar la cuenta con los siguientes datos:



Guardar.



ANDROID



IOS