



Guide rapide valise demo ACCURO

La valise DKA-231 est un modèle portable du système appel malade ACCURO. Il contient les éléments typiques que l'on peut retrouver dans une chambre d'hôpital ou d'Ehpad, et permet de visualiser son fonctionnement :

- Poste de chambre CHC-231
- Base murale avec boutons d'appel et connecteur de poire: LLC-903
- Poire d'appel et de contrôle d'éclairage: LLC-711
- Tirette de salle de bain: LLC-921
- Lecteur de carte pour contrôle de présence et d'accès: RFI-722
- Hublot de signalisation SEN-724.


De plus, elle est équipée d'un réseau WIFI qui vous permet de recevoir des appels sur les téléphones SIP et d'accéder à ACCUROViewer et ACCUROManager.

Voici comment démarrer le système, accéder à ACCUROViewer et ACCUROManager, et configurer un smartphone pour recevoir des appels.

1. Allumer la valise

Branchez la valise sur prise électrique.

Attendez que le CHC-231 affiche uniquement le texte suivant (cela peut prendre jusqu'à 1 min) :

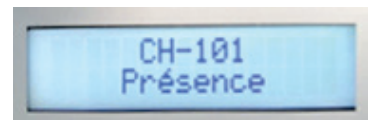

2. Accéder à ACCUROViewer

Accédez au wifi de la valise :
ACCURO_WIFI

Lire le code QR suivant :
<http://172.23.201.1/ALCADViewer>



3. Accéder à ACCUROManager

Accédez au wifi de la valise :
ACCURO_WIFI

Lire le code QR suivant :
<http://172.23.201.1/ALCADManager>
User : admin
Password : alcad



4. Configurer le smartphone

Afin de recevoir des appels et pouvoir utiliser l'interphonie avec le poste de chambre, il est nécessaire d'installer une application sur smartphone. Nous recommandons l'APP gratuite, GS Wave.

Téléchargez l'APP softphone
Entrez dans l'APP.

Allez dans: Paramètres ->
Options du compte -> Cliquez sur
le symbole « + ».



Configurez le compte avec les
éléments suivants :



Enregistrer.