

ACCURO:

Sistema llamada paciente-enfermería

MALETÍN DEMO

Manual de usuario resumido



ÍNDICE

01.	Elementos del sistema	2
02.	Vinculación de un teléfono móvil	3
03.	Funcionamiento del sistema	4
03.1.	Llamada del paciente al equipo de enfermería	4
03.2.	Presencia del equipo de enfermería en la habitación	5
03.3.	Presencia secundaria/auxiliar	5
03.4.	Llamada de ayuda desde la central de habitación	5
03.5.	Llamada código azul	6
03.6.	Llamadas desde el teléfono	6
03.7.	Modo limpieza	6
03.8.	Acceso a ACCUROViewer	7
03.9.	Acceso a ACCUROManager	7



**¡Peligro! Tensión eléctrica en el interior.
Manipular sólo por personal autorizado.**


01. Elementos del sistema



1. CENTRAL DE HABITACIÓN
2. PULSADOR DE CAMA
3. PULSADOR DE BAÑO
4. SEÑALIZADORES DE PASILLO
5. LECTOR DE TARJETAS RFID
6. TELÉFONO DE ASISTENCIA

02. Vinculación de un teléfono móvil


Al vincular un teléfono móvil al maletín podremos simular el comportamiento de un puesto de control de enfermería.

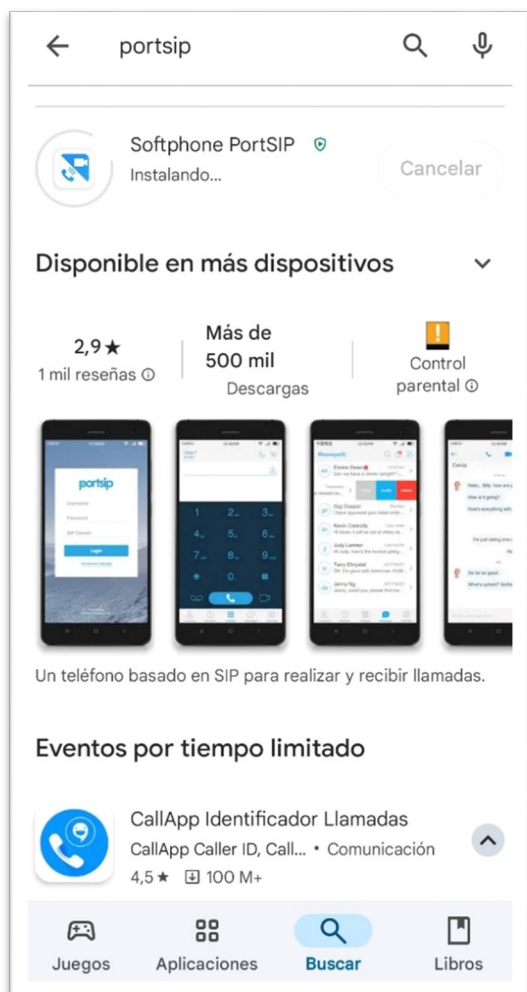


Primero habrá que descargarse la aplicación Softphone PortSIP en nuestro dispositivo móvil.



Una vez instalada habrá que conectarse con el teléfono a la red Wi-Fi: ACCURODEMO.

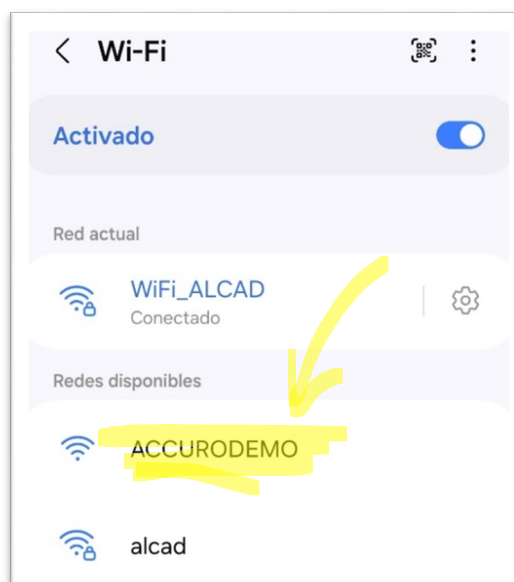

Ahora abriremos la aplicación y meteremos las siguientes credenciales:

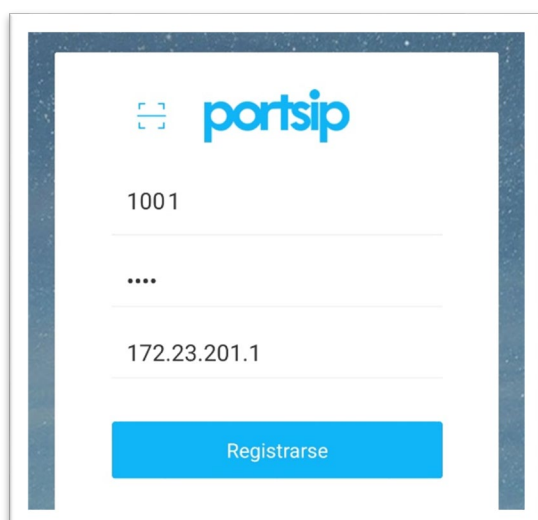

En la primera línea, introducimos el nombre de usuario: **1001**.

En la segunda línea, la contraseña: **1234**.

Y en la última línea, la dirección SIP: **172.23.201.1**.

De esta manera, el móvil estará listo para recibir llamadas del sistema ACCURO instalado en nuestro maletín.

03. Funcionamiento del sistema

El sistema de llamada paciente-enfermería de ALCAD garantiza una comunicación rápida y fluida entre el paciente y el equipo de enfermería.

Cada uno de los elementos se comporta de manera diferente según el tipo de llamada que esté en curso.

En el siguiente link encontrarás un pequeño vídeo explicativo:

<https://www.youtube.com/watch?v=utaC6f2wbjc>

03.1. Llamada del paciente al equipo de enfermería

Se puede llevar a cabo desde varios dispositivos:

- **Botón rojo de la central de habitación.** Se ilumina el botón, indicando que la llamada está en curso.
- **Botón rojo del pulsador de cama.** Se ilumina el botón, indicando que la llamada está en curso.
- **Botón rojo de la pera de cama.** Se ilumina el botón, indicando que la llamada está en curso.
- **Botón del pulsador de baño.** Se ilumina el botón, indicando que la llamada está en curso. Esta llamada siempre es prioritaria, por lo que debemos pulsar el botón de cancelación del propio dispositivo para cancelar la llamada.
- **Cordón del pulsador de baño.** Se ilumina el botón, indicando que la llamada está en curso. Esta llamada siempre es prioritaria, por lo que debemos pulsar el botón de cancelación del propio dispositivo para cancelar la llamada.

En todos los casos:

- Se activa el *display* de la central de habitación, indicando que la llamada está en curso.
- Se activa el teléfono móvil vinculado al maletín. Al descolgar el teléfono, es posible hablar directamente con la central.
- Se enciende la luz roja del señalizador de pasillo.

03.2. Presencia del equipo de enfermería en la habitación

Para hacer presencia en la habitación debemos pulsar el botón verde de la central de habitación, el botón verde del pulsador de cama o pasar la tarjeta por el lector RFID.

Se enciende la luz verde del señalizador de pasillo.

Para cancelar debemos pulsar el botón verde nuevamente. La luz del señalizador de pasillo se apaga.

03.3. Presencia secundaria/auxiliar

La presencia secundaria o de auxiliar en la habitación se activa al pulsar el botón ámbar de la central de habitación, que queda iluminado.

Se enciende la luz ámbar del señalizador de pasillo.

Para cancelar, debemos pulsar de nuevo el botón ámbar de la central de habitación. La luz del señalizador de pasillo se apaga.

También podemos cancelar la presencia secundaria con una presencia de enfermería, que cambiará la luz del señalizador de pasillo de ámbar a verde.

03.4. Llamada de ayuda desde la central de habitación

En el caso de que la profesional que hace presencia en la habitación necesite el apoyo de algún compañero, puede realizar una llamada de ayuda desde la central de habitación.

Esta llamada se activa pulsando el botón rojo de la central de habitación en modo Presencia, que queda iluminado.

El teléfono móvil vinculado se activa y el señalizador de pasillo se enciende (luces roja y verde).

La llamada se anula cuando se vuelve a pulsar el botón verde de la central de habitación o se hace presencia de otra manera.

03.5. Llamada código azul

En el caso de una emergencia y cuando la habitación está en modo Presencia, se puede activar el código azul pulsando el botón azul de la central, que queda iluminado.

El teléfono móvil vinculado se activa en modo emergencia y el señalizador de pasillo se enciende (luces azul y verde).

La llamada se anula cuando se hace presencia de enfermería, pulsando cualquiera de los botones verdes de la habitación o pasando una tarjeta por el lector RFID.

03.6. Llamadas desde el teléfono

También es posible lanzar una llamada desde el teléfono móvil vinculado, marcando el 0101.

03.7. Modo limpieza

Es posible poner la central de habitación en reposo para realizar labores de limpieza.

Para ello, debemos pulsar una secuencia de botones:

- Primero, pulsamos el botón amarillo de presencia secundaria.
- Después, mantenemos pulsado el botón MENU hasta que escuchemos un pitido.
- Para terminar, pulsamos OK.

A partir de este momento, la central se bloquea, quedando 2 minutos en modo limpieza (en el *display* se verá una cuenta atrás). Una vez pasado este tiempo, emitirá una melodía avisando de que ha terminado.

En este instante se volverá a pulsar el botón ámbar y la habitación estará nuevamente 100% operativa.

Recordar que este modo de limpieza sólo funciona si se habilita en ACCUROmanager. De fábrica viene desactivado.

03.8. Acceso a ACCUROViewer

Conectarse a la red Wi-Fi del maletín: ACCURODEMO.

Leer el siguiente QR:



<http://172.23.201.1/ALCADViewer>

03.9. Acceso a ACCUROManager

Conectarse a la red Wi-Fi del maletín: ACCURODEMO.

Su navegador tiene que ser compatible con flash para que este cargue la página de ACCUROManager.

Leer el siguiente QR:



<http://172.23.201.1/ALCADManager>

User: admin

Password: alcad