

**ACCURO:**

**Systeme d'appel  
patient infirmière**

**MALETTE DE DÉMONSTRATION**

**Manuel utilisateur simplifié**



## INDEX

---

01.	Éléments du système	2
02.	Appairage d'un téléphone mobile	3
03.	Fonctionnement du système	4
03.1.	Appel du patient à l'équipe infirmière	4
03.2.	Présence de l'équipe infirmière dans la chambre	4
03.3.	Présence secondaire / auxiliaire	5
03.4.	Appel d'assistance depuis le poste de chambre	5
03.5.	Appel code bleu	5
03.6.	Appels depuis le téléphone	6
03.7.	Mode nettoyage	6
03.8.	Accès à ACCUROViewer	7
03.9.	Accès à ACCUROManager	7




**Danger ! Tension électrique à l'intérieur. Manipulation uniquement par du personnel autorisé.**



## 02. Appairage d'un téléphone mobile



En appairant un téléphone mobile à la malette, il est possible de simuler le comportement d'un poste de contrôle infirmier.

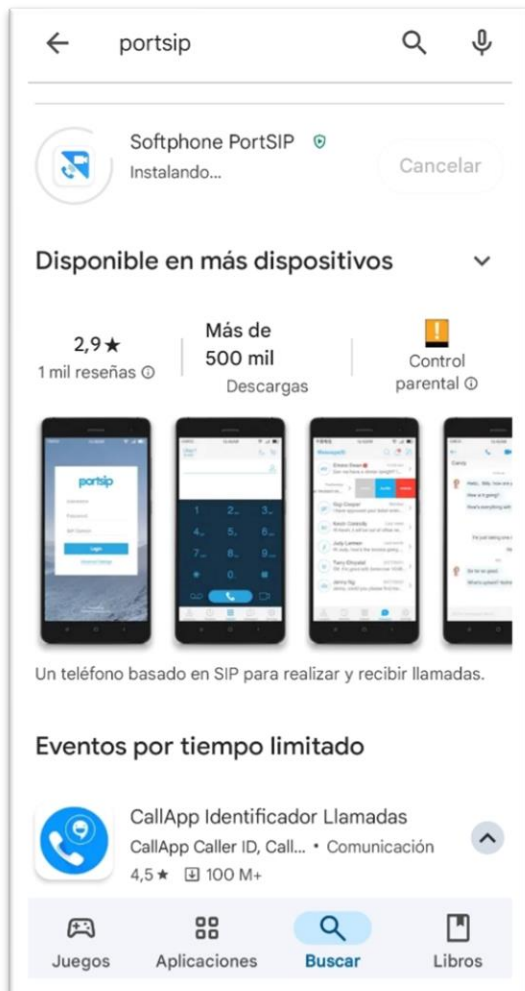

Télécharger l'application **Softphone PortSIP** sur le téléphone mobile.



Une fois installée, il faudra se connecter avec le téléphone au réseau Wi-Fi : **ACCURODEMO**

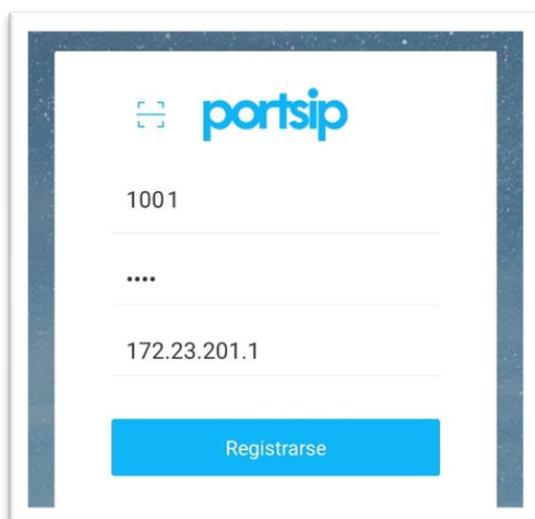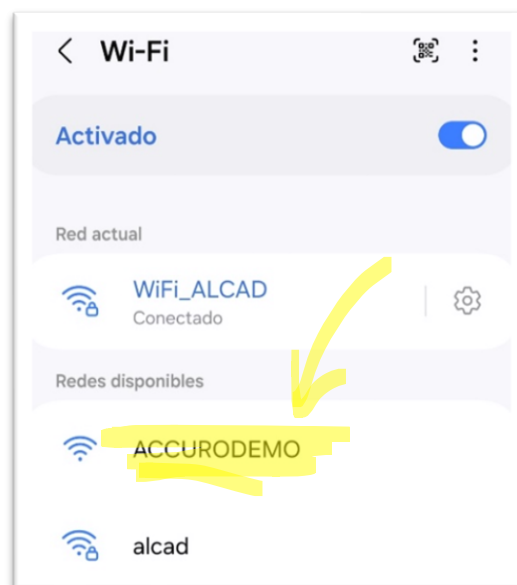

Maintenant, nous ouvrirons l'application et saisissons les identifiants suivants :

Sur la première ligne, saisir le nom d'utilisateur : **1001**

Sur la deuxième ligne, le mot de passe : **1234**

Et sur la dernière ligne, l'adresse SIP : **172.23.201.1**

## 03. Fonctionnement du système

Le système d'appel patient infirmière d'ALCAD garantit une communication rapide et fluide entre le patient et le personnel soignant.

Chaque élément du système se comporte différemment selon le type d'appel en cours.

Vidéo explicative :

<https://www.youtube.com/watch?v=utaC6f2wbjc>

### 03.1. Appel du patient à l'équipe infirmière

---

L'appel peut être effectué depuis plusieurs dispositifs :

- **Bouton rouge du poste de chambre.** Le bouton s'allume, indiquant que l'appel est en cours.
- **Bouton rouge du bouton d'appel lit.** Le bouton s'allume, indiquant que l'appel est en cours.
- **Bouton rouge de la poire d'appel.** Le bouton s'allume, indiquant que l'appel est en cours.
- **Bouton du bouton d'appel salle de bain.** Le bouton s'allume, indiquant que l'appel est en cours. Cet appel est toujours prioritaire ; pour l'annuler, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton d'annulation du dispositif lui-même.
- **Cordon du bouton d'appel salle de bain.** Le bouton s'allume, indiquant que l'appel est en cours. Cet appel est toujours prioritaire ; pour l'annuler, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton d'annulation du dispositif lui-même..

Dans tous les cas :

- L'écran du poste de chambre s'active.
- Le téléphone mobile appairé à la malette est activé (il est possible de communiquer directement avec le poste de chambre).
- Le hublot rouge du couloir s'allume.

### 03.2. Présence du personnel infirmier dans la chambre

---

Pour effectuer une présence dans la chambre, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton vert du poste de chambre, sur le bouton vert du bouton d'appel lit ou de passer la carte sur le lecteur RFID.

Le hublot de couloir s'allume en vert.

Pour annuler, il est nécessaire d'appuyer de nouveau sur le bouton vert. Le hublot de couloir s'éteint.

### 03.3. Présence secondaire / auxiliaire

---

La présence secondaire ou auxiliaire dans la chambre s'active en appuyant sur le bouton ambre du poste de chambre, qui reste allumé.

Le hublot de couloir s'allume en ambre.

Pour annuler, il est nécessaire d'appuyer de nouveau sur le bouton ambre du poste de chambre. Le hublot de couloir s'éteint.

Nous pouvons également annuler la présence secondaire par une présence du personnel infirmier, qui fera passer la lumière du hublot de couloir de l'ambre au vert.

### 03.4. Appel d'assistance depuis le poste de chambre

---

Dans le cas où le professionnel qui est présent dans la chambre a besoin du soutien d'un collègue, il peut effectuer un appel d'assistance depuis le poste de chambre.

Cet appel s'active en appuyant sur le bouton rouge du poste de chambre en mode Présence, qui reste allumé.

Le téléphone mobile appairé est activé et le hublot de couloir s'allume (lumières rouge et verte).

L'appel est annulé lorsque l'on appuie de nouveau sur le bouton vert du poste de chambre ou lorsqu'une présence est effectuée d'une autre manière.

### 03.5. Appel code bleu

---

En cas d'urgence et lorsque la chambre est en mode Présence, il est possible d'activer le code bleu en appuyant sur le bouton bleu du poste de chambre, qui reste allumé.

Le téléphone mobile appairé est activé en mode urgence et le hublot de couloir s'allume (lumières bleue et verte).

L'appel est annulé lorsqu'une présence du personnel infirmier est effectuée, en appuyant sur n'importe lequel des boutons verts de la chambre ou en passant une carte sur le lecteur RFID.

### 03.6. Appels depuis le téléphone

---

Il est également possible de lancer un appel depuis le téléphone mobile appairé, en composant le 0101.es posible lanzar una llamada desde el teléfono móvil vinculado, marcando el 0101.

### 03.7. Mode nettoyage

---

Il est possible de mettre le poste de chambre en repos afin de réaliser des tâches de nettoyage.

Pour cela, il est nécessaire d'appuyer sur une séquence de boutons :

- Tout d'abord, appuyer sur le bouton jaune de présence secondaire.
- Ensuite, maintenir le bouton MENU enfoncé jusqu'à entendre un signal sonore.
- Pour terminer, appuyer sur OK.

À partir de ce moment, le poste est verrouillé, restant 2 minutes en mode nettoyage (un compte à rebours apparaît à l'écran). Une fois ce temps écoulé, une mélodie est émise pour indiquer que le mode est terminé.

À ce moment-là, il faudra appuyer à nouveau sur le bouton ambre et la chambre sera de nouveau 100 % opérationnelle.

Il faut rappeler que ce mode nettoyage ne fonctionne que s'il est activé dans ACCUROManager. Par défaut, il est désactivé.

### 03.8. Accès à ACCUROViewer

---

Se connecter au réseau Wi-Fi de la valise : ACCURODEMO.

Scanner le QR suivant :



<http://172.23.201.1/ALCADViewer>

### 03.9. Accès à ACCUROManager

---

Se connecter au réseau Wi-Fi de la valise : ACCURODEMO.

Le navigateur doit être compatible avec Flash afin de charger la page ACCUROManager.

Scanner le QR suivant :



<http://172.23.201.1/ALCADManager>

User: admin

Password: alcad